

PIKAKÄYTTÖOHJE L2S15 LED-OTSAVALOSYSTEEMI

Osat: Kantolaukku, led-valo, kaksi akkua, keskusyksikkö, laturi toiselle akulle, kaukosäädin, kaksi AAA-paristoa, silmälasiklipsi, 2 klipsiä vaatekiinnitykseen, monitoimiruuvimeisseli, kaukosäätimen säätöpiikki.


1. Lataa akku täyteen:
 - a. Liitä sähköjohto ja muuntaja.
 - b. Yhdistä sähköjohto laturiin akun päähän vasempaan ylänurkkaan ja sähköpistorasiaan.
 - c. Akussa näet latausvalon lähtevän pyörimään.
Kun akku on täynnä, tulee siihen ilmoitus "FU" (full).
Täyteen latautuminen kestää n. 3 tuntia. (Uuden akun 5 tuntia.)



Sähköjohto



Muuntaja

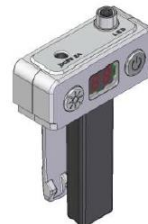

Keskusyksikkö ja laturi (Main Body)



Laturi



Toinen akku.

2. Yhdistä keskusyksikkö ja akku, jos ovat irrallaan.
Liitä valolähteen johdon pää keskusyksikön oikeaan yläkulmaan.



3. Kiinnitä LED-lamppu silmälaseihin, suojalaseihin, otsapantaan (lisävaruste).
Kiinnitä aina ruuvipuoli ylöspäin.



Käytä tarvittaessa silmälasiklipsiä silmä- tai luppilaseihin kiinnitykseen.



Silmälasiklipsi



Otsapanta (lisävaruste)

4. Kiinnitä valojohto johdossa olevilla kumilenkeillä silmälasin sankaan ja tarvittaessa klipsillä kiinni hattuun tai takkiin. Johto ei saisi olla jyrkästi taivutettuna. Varsinkin tulisi varjella valolähteen kantaosaa.




Kumilenkit johdossa




Klipsi

5. Ota suojus pois LED-lampun päältä.
6. Laita valo päälle katkaisijasta. Akun kesto tulee myös näkyviin (FU 100 %).
Vasemman puoleisesta katkaisijasta säädetään eri valotehot.
Valotehoja on neljä. Tehoa vaihdettaessa se näkyy näytössä hetken.

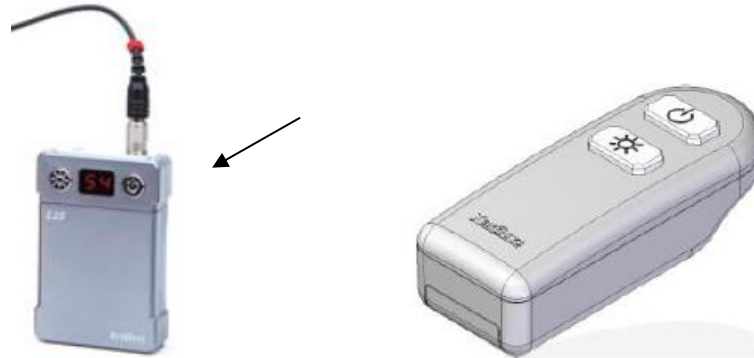

Tämän jälkeen voi käyttää kaukosäädintä.
Kaukosäätimessä on kaksi AAA-paristoa, jotka tulevat setin mukana.

7. Käänä LED-lappua siten, että valokeila osoittaa työskentelyalueellesi.
8. Laita keskusyksikkö taskuun tai kiinnitä se keskusyksikössä olevalla pidikkeellä kiinni vaatteisiin. Ei mielellään etupuolelle.
9. Akku kestää yhdellä latauksella 5-23h säädetyistä valotehosta riippuen. Irrota akku painamalla keskusyksikön takana olevaa painiketta ja vetämällä samalla akku irti keskusyksiköstä. Liitä uusi ladattu akku keskusyksikköön.

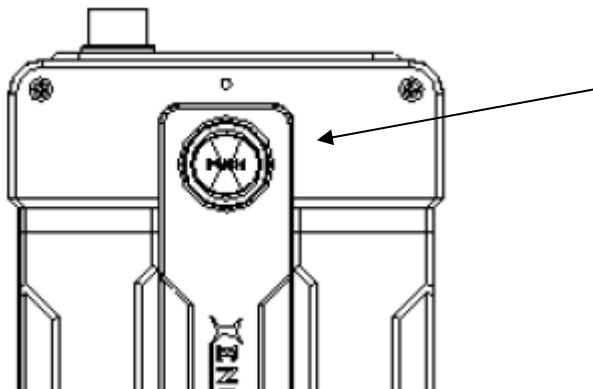

Akku kestää käyttökelpoisena pidempään, jos sen käyttää aina mahdollisimman tyhjäksi ennen latausta.

Toisen akun voi laittaa lataukseen, kun toinen on käytössä.

10. Käytön lopuksi sammuta virta keskusyksiköstä. Laita suoja LED-lampun päälle.
11. Jokaisen LED-valosysteemin mukana tulee ruuvimeisseli, jolla ruuveja voi avata ja kiristää tarvittaessa.

Säätöpiikkiä käytetään, jos kaukosäädin vaihtuu.



12. Otsavalosysteemiä olisi hyvä säilyttää kantolaukussaan.



Markkinointi:

Amartmed Oy, www.amartmed.fi

asiakaspalvelu@amartmed.fi

Tuotetiedot: Anna Hakola, anna@amartmed.fi puh. 040 510 8666

Tomi Roine, tomi@amartmed.fi, puh. 045 7733 2977