

## XD LIGHT LED-OTSAVALOSYSTEEMI: PIKAKÄYTTÖOHJE

Osat: Kantolaukku, led-valo, keskusyksikkö, muuntaja, sähköjohto, silmälasiklipsi, 2 klipsiä vaatekiinnitykseen, monitoimiruuvimeisseli.

1. Lataa akku täyteen:
  - a. Liitä sähköjohto ja muuntaja.
  - b. Yhdistä sähköjohto keskusyksikön alle ja sähköpistorasiaan.
2. Liitä valolähteen johdon pää keskusyksikön oikeaan yläkulmaan.




3. Kiinnitä LED-lamppu silmälasisiin, suojalaseihin, otsapantaan (lisävaruste).  
Kiinnitä aina ruuvipuoli ylöspäin.



Otsapanta (lisävaruste)

Käytä tarvittaessa silmälasiklipsiä silmä- tai luppilaseihin kiinnitykseen.

4. Kiinnitä valojohto johdossa olevilla kumilenkeillä silmälasin sankaan ja tarvittaessa klipsillä kiinni hattuun tai takkiin. Johto ei saisi olla jyrkästi taivutettuna. Varsinkin tulisi varjella valolähteen kantaosaa.

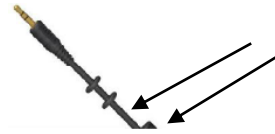

Kumilenkit johdossa



Klipsi

5. Ota suojus pois LED-lampun päältä.
6. Laita valo päälle katkaisijasta (ylempi).  
Alemmasta katkaisijasta säädetään eri valotehot.  
Valotehoja on neljä.
7. Käännä LED-lappua siten, että valokeila osoittaa työskentelyalueellesi.
8. Laita keskusyksikkö taskuun tai kiinnitä se keskusyksikössä olevalla pidikkeellä kiinni vaatteisiin. Ei mielellään etupuolelle.

Akku kestää yhdellä latauksella 5,5-22h säädetystä valotehosta riippuen. Akun latausvalo on yläpuolella oikealla. Vihreä-oranssi-vilkkuva oranssi.



*Akku kestää käyttökelpoisena pidempään, jos sen käyttää aina mahdollisimman tyhjäksi ennen latausta.*

9. Käytön loppuksi sammuta virta keskusyksiköstä. Laita suoja LED-lampun päälle.
10. Otsavalosysteemiä olisi hyvä säilyttää kantolaukussaan.



Markkinointi:

Amartmed Oy, [www.amartmed.fi](http://www.amartmed.fi)

asiakaspalvelu@amartmed.fi

Tuotetiedot: Anna Hakola, [anna@amartmed.fi](mailto:anna@amartmed.fi), puh. 040 510 8666

Tomi Roine, [tomi@amartmed.fi](mailto:tomi@amartmed.fi), puh: 045 7733 2977