

## PIKAKÄYTTÖOHJE L2S14C LED-OTSAVALOSYSTEEMI

Osat: Kantolaukku, päähine led-valolla ja kontrolliyksiköllä, kaksi ladattavaa akkua, laturi, monitoimiruuvimeisseli, muuntaja, sähköjohto, varapehmuste päähineeseen, puhdistusliina.

1. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttöä:
  - a. Liitä sähköjohto ja muuntaja.
  - b. Yhdistä sähköjohto laturiin ja aseta akku paikalleen ja sähköpistorasiaan.
  - c. Laturiin syttyy punainen valo.  
Kun akku on täynnä, valo muuttuu vihreäksi.  
Täyteen latautuminen kestää n. 3 tuntia.

2. Laita akku paikalleen päähineeseen:




3. Aseta päähine päähäsi ja pyöritä ylhäällä ja takana olevista ruuveista se sopivan kokoiseksi. Säädä LED-valo silmiesi tasolle ja siten, että se osoittaa työskentelyalueellesi.

4. Ota suojus pois LED-valon päältä. Valotehoa säädellään kontrolliyksikön kytkimestä. Kuulet "peep"-äänien keskitason valotehoilla. Kontrolliyksikköön syttyy vihreä valo akun ollessa täysi. Akun tyhjentäessä valo muuttuu: Vihreä-oranssi-punainen-vilkkuva punainen. Lataa akku, kun kuulet kolme kertaa "piip"-äänien ja punainen valo vilkuttaa.



5. Käytön loppuksi sammuta valo keskusyksiköstä ja laita LED-lampunsuoja paikoilleen.
6. Otsavalosysteemiä olisi hyvä säilyttää kantolaukussaan.
7. Jos et käytä valoa pitkään aikaan, poista akku paikaltaan. Akkua on tärkeää käsitellä varovasti, ettei se saa kolhuja (koskee kaikkia akkuja).
8. LED-valosysteemin mukana tulee ruuvimeisseli, jolla ruuveja voi kiristää tarvittaessa. Jos tuntuu, että otsavalon valo on liian pitkällä edessä, voi ottaa ylimääräiset nivelet pois.

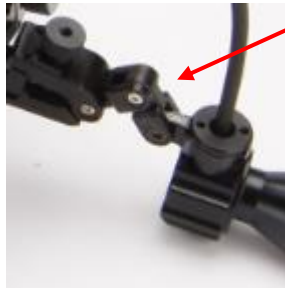

9. Lisää käyttöön liittyviä vihjeitä löytyy englanninkielisestä käyttöohjeesta.

Markkinointi:

Amartmed Oy, [www.amartmed.fi](http://www.amartmed.fi)

asiakaspalvelu@amartmed.fi

Tuotetiedot: Anna Hakola, [anna@amartmed.fi](mailto:anna@amartmed.fi) puh. 040 510 8666

Tomi Roine, [tomi@amartmed.fi](mailto:tomi@amartmed.fi), puh. 045 7733 2977